
Használati utasítás

03.820.282 Csúszókalapács nyaki gerinci alkalmazáshoz

A jelen használati utasítás az Egyesült
Államokban nem forgalmazható.



Authorized Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Használati utasítás

03.820.282 Csúszókalapács nyaki gerinci alkalmazáshoz

Használat előtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati utasítást, a Synthes „Fontos tudnivalók” c. tájékoztatóját, valamint az idevágó műtéttechnikákat bemutató dokumentumot. Gondoskodjon a megfelelő műtéttechnikában való jártasságáról.

Felhasznált anyagok

Anyag: Szabvány:
Rozsdamentes acél DIN EN ISO 10088-3
Rozsdamentes acél DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Rendeltetés

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapács rendeltetészerűen kizárólag eszközök, például vésők vagy implantátumfogók eltávolításához használható. Az eszközök csigolyatestbe történő bevezetéséhez minden esetben tilos felhasználni.

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapácsot az eszköz végére kell csúsztatni, amíg a kapcsolószerkezet a helyére nem kattant. Miközben az egyik kezével tartja az eszközt, a másik kezével fejtse ki felfele irányuló erőt a csúszókalapácsra, hogy az eszközt kihúzza a csigolyatestből. Ezt ismételje addig, ameddig az eszközt nem sikerül eltávolítani.

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapács úgy választható le az eszköztől, hogy megfogja a csúszókalapács végét.

Figyelmeztetések

Az adott eszközzel összefüggő figyelmeztetések:

Minden esetben tilos eszközök bevezetéséhez használni.

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapácsot minden esetben tilos elengedni, amikor a páciensben elhelyezett eszközhöz van csatlakoztatva, hogy elkerülhető legyen az anatómiai képleteknek az eszközszerkezet megbillenése miatti károsodása.

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapácsra tilos túlzott erőt kifejteni, és kerülni kell a csúszókalapács súlyának ellenőrizetlen hirtelen csökkenését.

Orvostechnikai eszközök kombinálása

A nyaki gerinchez kialakított csúszókalapács kizárólag az eszközök eltávolításához használható.

A Synthes nem vizsgálta az összeférhetőséget más gyártók által biztosított eszközökkel, és ilyen esetekre semmilyen helytállási kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal.

Az eszköz használata előtti kezelés

Tisztítás és sterilizálás során a csúszókalapács súlyát a vezetőrúd közepére kell helyezni.

A nem steril állapotban szállított Synthes termékeket a műtéti felhasználás előtt meg kell tisztítani, és gőzsterilizálni kell. Tisztítás előtt el kell távolítani a teljes eredeti csomagolást. Gőzsterilizálás előtt tegye a terméket jóváhagyott csomagolóanyagba vagy edénybe. Kövesse a Synthes „Fontos tudnivalók” című tájékoztatójában található tisztítási és sterilizálási utasításokat.

Az eszköz kezelése és felújítása

Az implantátumok kezelésével és az újrafelhasználható eszközök, műszertálcák és tokok felújításával kapcsolatos részletes utasításokat a Synthes „Fontos tudnivalók” c. tájékoztatója ismerteti. Az eszközök össze- és szétszerelésével kapcsolatos utasításokat tartalmazó „A többrészes eszközök szétszerelése” c. dokumentum a következő weboldalon tölthető le:

<http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuyssynthes.com