
Bruksanvisning

03.820.282 Sleidhammer for halsrygggrad

Denne bruksanvisningen er ikke ment for distribusjon i USA.



Authorized Representative

DePuy Ireland UC
Loughbeg
Ringaskiddy
Co. Cork Ireland

Bruksanvisning

03.820.282 Sleidhammer for halsrygggrad

Les denne bruksanvisningen, Synthes "Viktig informasjon" og korresponderende kirurgisk teknikk nøye før bruk. Kontroller at du er kjent med riktig kirurgisk teknikk.

Materiale

Materiale: Standard:
Rustfritt stål DIN EN ISO 10088-3
Rustfritt stål DIN EN ISO 8734 -2x22 -C1

Tenkt bruk

Skyvehammer for halsrygggrad er kun ment å brukes for å fjerne instrumenter, som f.eks. meisler eller implantatholdere. Den må aldri brukes for å føre instrumentene inn i den vertebrale enheten.

Skyv skyvehammer for halsrygggrad på enden av instrumentet til hurtigkoblingen klikker på plass. Mens du holder instrumentet med én hånd, bruker du oppadgående kraft for å skyve hammeren med den andre hånden for å trekke instrumentet ut av den vertebrale enheten. Gjenta denne prosessen til instrumentet er fjernet.

Koble skyvehammer for halsrygggrad fra enden av instrumentet ved å skyve på enden av skyvehammeren.

Advarsler

Enhets-spesifikke advarsler:

Den må aldri brukes for å føre instrumenter fremover.

Slipp aldri skyvehammeren for halsrygggrad når den er festet til et instrument i pasienten, da dette kan føre til skader på de anatomiske strukturene på grunn av at instrumentet vipper.

Ikke bruk for mye kraft på skyvehammer for halsrygggrad og unngå at skyvehammerens vekt faller ukontrollert.

Kombinasjon av medisinske enheter

Skyvehammeren for halsrygggrad kan kun brukes for fjerning av instrumenteringen. Synthes har ikke testet kompatibilitet med enheter som leveres av andre produsenter og påtar seg ikke noe ansvar i slike tilfeller.

Behandling før enheten brukes

Skyvehammeren må plasseres i midten av ledestangen i løpet av rengjøring og sterilisering.

Synthes-produkter som leveres i ikke-steril tilstand må rengjøres og dampsteriliseres før kirurgisk bruk. Før rengjøring må du fjerne all originalemballasje. Før dampsterilisering må du plassere produktet i en godkjent innpakning eller beholder. Følg rengjørings- og steriliseringsinstruksjonene som gis i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon".

Prosessering/reprosessering av enheten

Detaljerte instruksjoner for prosessering av implantater og reprosessering av gjenbrukbare enheter, instrumentbrett og bokser er beskrevet i Synthes-brosjyren "Viktig informasjon". Monterings- og demonteringsinstruksjoner for instrumenter "Demontering av flerdelsinstrumenter" kan lastes ned fra:

<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com