
Οδηγίες Χρήσης

03.835.043

Λαβή περιορισμού ροπής,
ευθεία με κλειδί σύσφιξης με κασάνια 3 Nm

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης δεν προορίζονται
για διανομή στις ΗΠΑ.

Οδηγίες Χρήσης

Σημαντική επισήμανση για τους επαγγελματίες υγείας και το προσωπικό χειρουργείου: Αυτές οι οδηγίες χρήσης δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή και τη χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση αυτές τις οδηγίες χρήσης και το έντυπο με τίτλο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την κατάλληλη χειρουργική διαδικασία.

Υλικό(-ά)

Υλικό(-ά): Πρότυπο(-α):
Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM F899/A276/A564
Σιλικόνη

Προοριζόμενη χρήση

Η λαβή περιορισμού ροπής προορίζεται για την υποστήριξη της εμφύτευσης των εμφυτευμάτων Synthes.

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Σε περίπτωση που η λαβή περιορισμού ροπής χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εμφυτεύματα ή εργαλεία, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης για ενδείξεις και αντενδείξεις, καθώς και πρόσθετα χειρουργικά βήματα.

Συνδυασμός ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Η Synthes δεν έχει ελέγξει τη συμβατότητα με προϊόντα που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επεξεργασία πριν από τη χρήση του προϊόντος

Τα προϊόντα της Synthes που δεν διατίθενται αποστειρωμένα πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται με ατμό πριν από τη χειρουργική χρήση. Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλη την αρχική συσκευασία. Πριν την αποστείρωση με ατμό, τοποθετήστε το προϊόν σε εγκεκριμένο περιτύλιγμα ή περιέκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης που παρέχονται στο έντυπο «Σημαντικές Πληροφορίες» της Synthes.

Επανεπεξεργασία του προϊόντος

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επανεπεξεργασία των εμφυτευμάτων, εργαλείων και θηκών περιγράφονται στις ενότητες «Σημαντικές Πληροφορίες». Μπορείτε επίσης να λάβετε τις οδηγίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των εργαλείων με τίτλο «Αποσυναρμολόγηση εργαλείων πολλαπλών τμημάτων» από την ιστοσελίδα: <http://emea.depuyssynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Πρόσθετες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν

Σημαντική σημείωση για τη συντήρηση

Συνιστούμε τη συντήρηση των εργαλείων περιορισμού ροπής ως εξής:

– Μία φορά κάθε 6 μήνες ή μετά από κάθε 50 κύκλους σε αυτόκλειστο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο

– Αν υποψιάζεστε ότι το εργαλείο δεν είναι βαθμονομημένο

Η συντήρηση διεκπεραιώνεται μέσω των κανονικών καναλιών πωλήσεων της θυγατρικής στην αντίστοιχη χώρα.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com