
Navodila za uporabo

03.835.043

Ročaj z omejevalnikom navora,
raven z zatikalnim ključem, 3 Nm

To navodilo za uporabo ni namenjeno
distribuciji v ZDA.

Navodila za uporabo

Pomembna opomba za zdravstvene delavce in osebje v operacijski dvorani: Ta navodila za uporabo ne vključujejo vseh informacij, ki so potrebne za izbiro in uporabo pripomočka. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo in brošuro podjetja Synthes »Pomembne informacije«. Seznanite se z ustreznim kirurškim posegom.

Material(-i)

Material(-i): Standard(-i):
Nerjavno jeklo ASTM F899/A276/A564
Silikon

Namen uporabe

Ročaj z omejevalnikom navora je predviden za pomoč pri vsaditvi vsadkov Synthes.

Indikacije in kontraindikacije

Če ročaj z omejevalnikom navora uporabljate skupaj z vsadki ali instrumenti, v ustreznih navodilih za uporabo poiščite indikacije in kontraindikacije ter dodatne kirurške korake.

Kombiniranje medicinskih pripomočkov

Podjetje Synthes ni izvedlo preskusa združljivosti s pripomočki drugih izdelovalcev, zato v takšnih primerih ne prevzema odgovornosti.

Priprava pripomočka na uporabo

Izdelke podjetja Synthes, ki ob dobavi niso sterilni, je treba pred kirurško uporabo očistiti in sterilizirati s paro. Pred čiščenjem odstranite vso prvotno ovojnino. Pred sterilizacijo s paro položite izdelek v odobren ovoj ali posodo. Upoštevajte navodila za čiščenje in sterilizacijo, ki so navedena v brošuri podjetja Synthes »Pomembne informacije«.

Priprava pripomočka na ponovno uporabo

Podrobna navodila za pripravo vsadkov, instrumentov in ohišij na ponovno uporabo so navedena v brošuri »Pomembne informacije«. Dokument »Razstavljanje večdelnih instrumentov« z navodili za sestavljanje in razstavljanje instrumentov je na voljo na spletni strani:
<http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance>

Dodatne informacije o posameznem pripomočku

Pomembna opomba o servisiranju

Servisiranje instrumentov z omejevalnikom navora priporočamo:

- vsakih 6 mesecev ali po 50 ciklih avtoklaviranja, kar nastopi prej;
- če sumite, da instrument ni več umerjen.

Servisiranje se izvaja po običajnih prodajnih poteh, ki jih ima vzpostavljene podružnica v zadevni državi.



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com