
Uputstvo za upotrebu 387.346 SynFrame držač za operacioni sto, izolovan, tamnoplav

Nije predviđeno da se ovo uputstvo
distribuiru u SAD.

Uputstvo za upotrebu

387.346 SynFrame držač za operacioni sto, izolovan, tamnoplav

Pre upotrebe pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, Synthes brošuru „Važne informacije“ i odgovarajuće hirurške tehnike. Postarajte se da se upoznate sa odgovarajućom hirurškom tehnikom.

SynFrame držač za operacioni sto (387.346) omogućava pozicioniranje pacijenta bez uzemljenja. Zato se ovim proizvodom mora rukovati pažljivo. Svako oštećivanje ove komponente, posebno izolacionog materijala, može da dovede do gubitka izolacije ili povređivanja pacijenta.

Materijal

Materijali	Standardi
Nerđajući čelik (SSt)	ASTM F899 / A276 / ISO 7153-1
Nitronic 60 (SSt)	ASTM F899 / A276
Legura aluminijuma (Al 6082)	ASTM B221M / DIN EN 573
Polifenilsulfon (PPSU)	

Pozicioniranje pacijenta bez uzemljenja

Sistem SynFrame izoluje SynFrame držač za operacioni sto (387.346) od uzemljenog operacionog stola, u skladu sa bezbednosnim standardima IEC 60601-1 i 2-2, VDE 0750 deo 2 i VDE 0753 koji se odnose na pozicioniranje pacijenta bez uzemljenja.

Synthes može da obezbedi pozicioniranje pacijenta bez uzemljenja samo ako se SynFrame koristi u kombinaciji sa SynFrame držačem za operacioni sto (387.346), koji mora biti u savršenom stanju.

Stabilna konstrukcija sistema SynFrame

SynFrame držač odgovara dimenzijama SynFrame vodeće cevi za osnovni sistem (387.343) i pruža stabilnu konstrukciju.

Tretiranje pre upotrebe uređaja

Synthes proizvodi koji se isporučuju nesterilni, pre hirurške upotrebe moraju se očistiti i sterilisati parom. Uklonite svu originalnu ambalažu pre čišćenja. Pre sterilizacije parom stavite proizvod u odobreni omotač ili sud. Poštujte uputstvo za sterilizaciju dato u brošuri Synthes „Važne informacije“.

Dezinfekcija i čišćenje

Za uklanjanje nečistoća koristite blage rastvore za čišćenje i dezinfekciju.

Ako se sredstvo za čišćenje koristi zajedno sa sredstvom za dezinfekciju, preporučuje se korišćenje i sredstva za dezinfekciju i aditiva za čišćenje istog proizvođača. Postarajte se da rastvori budu kompatibilni i strogo poštujte uputstva proizvođača koja se odnose na koncentracije i vreme potapanja.

Obrada/ponovna obrada uređaja

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu uređaja za višekratnu upotrebu, tacni za instrumente i kućišta opisana su u brošuri Synthes „Važne informacije“.

Napomena: Ne sterilizite plazmom.

Rasklapanje

SynFrame držač se nikako ne sme rasklapati jer to može da izazove oštećenja i naruši izolaciona sredstva sistema.

Kombinovanje medicinskih uređaja

Synthes nije testirao kompatibilnost sa uređajima drugih proizvođača i ne preuzima odgovornost za takve slučajeve.

Upozorenje

Pre svake medicinske primene pregledajte da li na SynFrame držaču ima eventualnih oštećenja, posebno oštećenja na izolacionoj plastičnoj površini, kao što su lomovi ili pukotine od naprezanja.

Oštećeni SynFrame držači ne smeju se koristiti ponovo. Ako imate nedoumica, obratite se lokalnom predstavniku kompanije Synthes.

SynFrame držač ne sme da se koristi ako mu je istekao rok upotrebe.

Za više informacija o rukovanju SynFrame držačem pročitajte hiruršku tehniku SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com